

dfu EASY TEST DOA 4-2

Sàng lọc nhanh

Kết quả chính xác

Chất lượng hàng đầu

Bộ xét nghiệm chẩn đoán phát hiện:

11-nor- Δ^9 -THC-9 COOH (THC)

Methamphetamine (MET)

Morphine (MOR)

Amphetamine (AMP)

trong mẫu nước tiểu



TÍNH NĂNG NỔI BẬT:

-  Phát hiện 4 chất cùng lúc.
-  Kết quả nhanh sau 5 phút.
-  Quy cách đóng gói linh hoạt.
-  Túi hút ẩm có chỉ thị màu.



Khay thử dạng nhúng xét nghiệm định tính phân biệt

THC/MET/MOR/AMP

Số lưu hành: 250000570/PCBB-HCM

Quy cách đóng gói:



Mã: H46A
15 Xét nghiệm/hộp



Mã: H46B
20 Xét nghiệm/hộp



Mã: H46C
25 Xét nghiệm/hộp


NGƯỠNG PHÁT HIỆN

Chất	Nồng độ (ng/mL)
11-nor- Δ^9 -THC-9 COOH (THC)	50
Methamphetamine (MET)	500
Morphine (MOR)	300
Amphetamine (AMP)	500

Vùng kiểm soát thông tin

Vùng đọc kết quả

Vùng nhúng nước tiểu

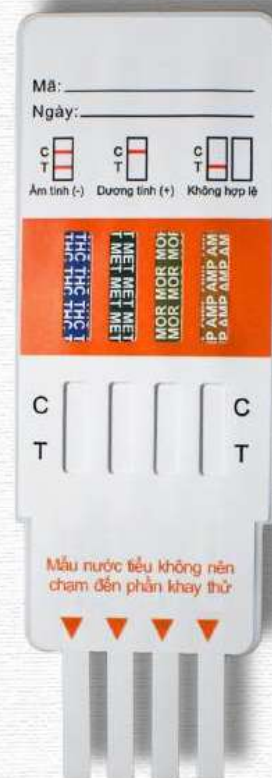

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

- Mở nắp và nhúng khay thử vào mẫu nước tiểu (10-15s)
- Đặt lên mặt phẳng khô
- Đọc kết quả sau 5 phút (không đọc quá 10 phút)
 - 1 vạch: Dương tính
 - 2 vạch: Âm tính
 - Không có vạch C: Không hợp lệ



dfu
Diagnosis F Co., Ltd.

Hướng tới giải pháp xét nghiệm hàng đầu Việt Nam

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT CÔNG NGHỆ SINH HỌC DIAGNOSIS F

Tầng 5, Nhà xưởng số 02, Lô I-3b-1, Đường N6, Khu Công nghệ cao TP.HCM, Phường Tân Phú, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

(+84) 28 71098734

www.dfu.com.vn

